

TENSMED S82

TAILLE REDUITE, PERFORMANCE HORS NORMES !



Le TENS MED S82 est la solution professionnelle idéale pour la stimulation musculaire et le traitement de la douleur.

Grâce à cet appareil, vous pouvez traiter les douleurs chroniques, soulager les patients ayant subi un traumatisme, en situation d'immobilisation, et améliorer la posture et la stabilisation des articulations du genou à l'aide des courants TENS (stimulation nerveuse électrique transcutanée). Les traitements sont sûrs, n'ont aucun effet secondaire et peuvent offrir une excellente alternative aux médicaments antidouleurs.

Le TENS MED S82 est un électrostimulateur à 2 canaux avec un écran LCD rétro-éclairé d'une grande lisibilité.

65 PROTOCOLES

- 12 Sport
- 8 Fitness, Beauté & Bien-être
- 16 Douleur (TENS)
- 9 Prévention
- 11 Rééducation
- 3 Incontinence
- 6 Programmes libres



CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

PROGRAMMABLE	6 mémoires libres pour sauvegarder les paramètres de votre choix et créer des programmes personnalisés
PROTOCOLES PRÉDÉFINIS	59 protocoles spécifiques pour la rééducation fonctionnelle et le traitement de la douleur
MENU RAPIDE	pour une navigation plus rapide
SYNCR0-STIM	augmente l'intensité des 2 canaux simultanément à l'aide d'un seul bouton
AFFICHAGE RÉTRO-ÉCLAIRÉ	l'écran LCD de grande visibilité contribue à la convivialité et à la simplicité d'utilisation de l'appareil
FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE	RECHARGEABLE

65 Protocoles

12 Sport

8 Fitness, Beauté & Bien-être

16 Douleur (TENS)

9 Prévention

11 Rééducation

3 Incontinence

6 Programmes libres

RÉÉDUCATION : Les programmes de stimulation musculaire sont tout particulièrement indiqués dans le cadre de la rééducation fonctionnelle après une intervention chirurgicale au niveau des articulations et après une période d'immobilisation. Programmes spécifiques inclus : Renforcement du Vaste interne, Récupération après chirurgie du LCA, Programmes de prévention, Remise en forme et Hémiplégie.


DOULEUR : Élimine la douleur grâce aux impulsions spéciales de courants TENS qui stimulent votre corps tout en douceur, vous permet de retrouver votre forme et votre bien-être. Programmes spécifiques inclus : Douleurs aiguë et chronique, Douleur cervicale, Lumbago, Périarthrite, Épicondylite, Sciatique et blessures des tissus mous.

INCONTINENCE : Programmes spécifiques pour le traitement des troubles urinaires comme l'incontinence urinaire d'effort, l'incontinence de stress et l'incontinence mixte.

SPORT : Le TENS MED S82 est programmé de sorte à stimuler de manière sélective les fibres rapides et lentes en vue de développer les différentes capacités musculaires. Programmes spécifiques inclus : Échauffement, Force maximum, Force d'endurance, Force explosive, Relâchement (détente musculaire), Capillarisation et Récupération post-compétition/entraînement actif.

FITNESS, BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE : La beauté du corps est l'expression d'un état de bien-être et une forme d'équilibre que nous devons valoriser et préserver contre les assauts du temps et la vie sédentaire. Avec le TENS MED S82, vous pouvez prendre soin de votre corps et entretenir sa vitalité et sa beauté grâce aux traitements esthétiques par électrostimulation. La solution idéale pour drainer, vasculariser, raffermir, tonifier, sculpter et muscler.

PRÉVENTION : Programmes destinés à renforcer les articulations principales (comme les épaules, les genoux et la hanche) et prévenir ainsi les traumatismes et les blessures.

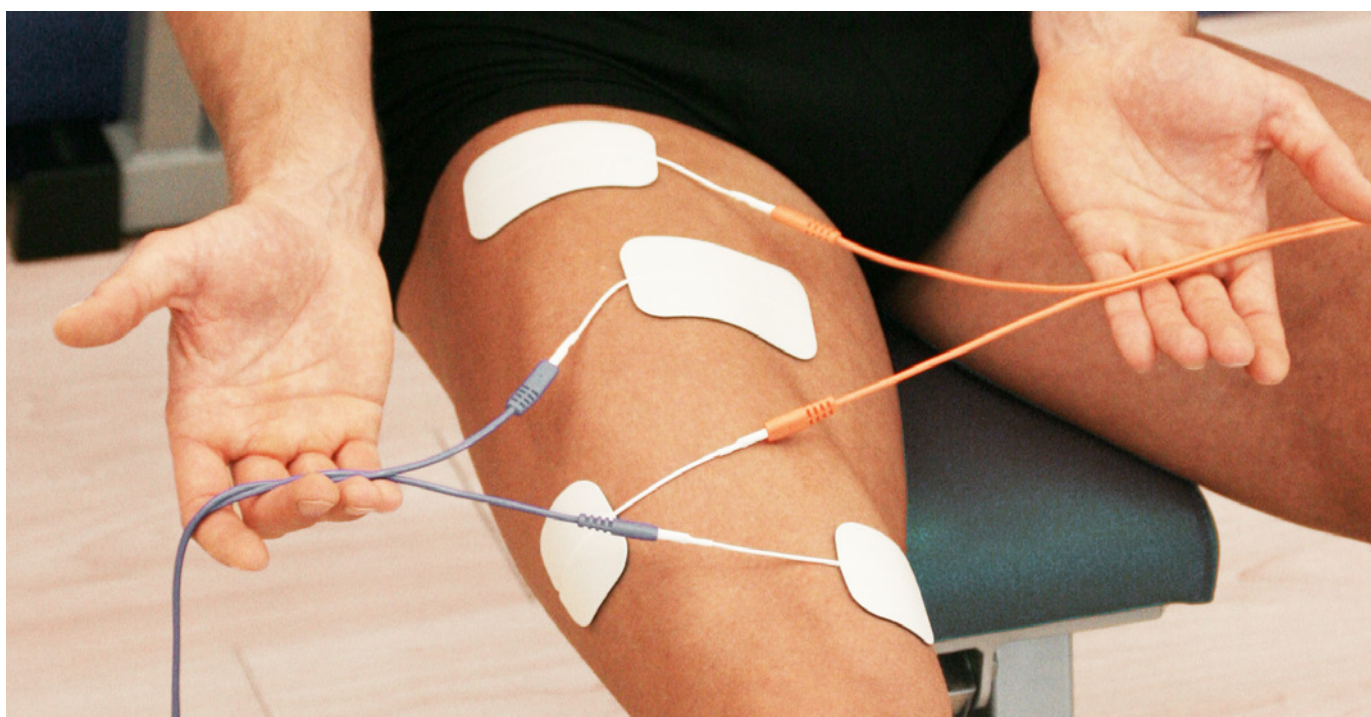

TENSMED S82

1727901 TENSMED S82




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de canaux:	2 canaux non indépendants
Intensité:	0-100 mA par canal
Forme d'onde:	Symétriques impulsion biphasique, 100% compensé
Courant constant:	À une résistance des 1000 ohm
Fréquence:	1 – 150 Hz
Largeur d'impulsion (monophasée):	50-400 µs
Largeur totale d'impulsion:	100-800 µs
Nombre de protocoles prédéfinis	59
Nombre de programmes libres:	6
Formes de stimulation	Conventionnelle / Continue En salves Modulation de fréquence Modulation de largeur d'impulsion Intermittente
Minuterie	max. 100 min
Alimentation :	Secteur ou batterie
Batterie:	Batterie rechargeable (NI-MH / 800mAh / 4.8V)
Chargeur:	Entree: 100-240VAC, 50-60Hz, 0,32 max. sortie: 6,5V --- 200mA 130x80x20 mm
Dimensions:	220 g
Poids:	
Affichage retroéclairé	
Appareil de catégorie II A	
Conforme à la Directive 93/42/CEE-2007/47/CEE	

ACCESSOIRES STANDARDS

Sacoche de transport
2 Câbles patient
4 Électrodes carrées autocollantes (50x50mm)
4 Électrodes rectangulaires autocollantes (50x90mm)
Chargeur
Mode d'emploi

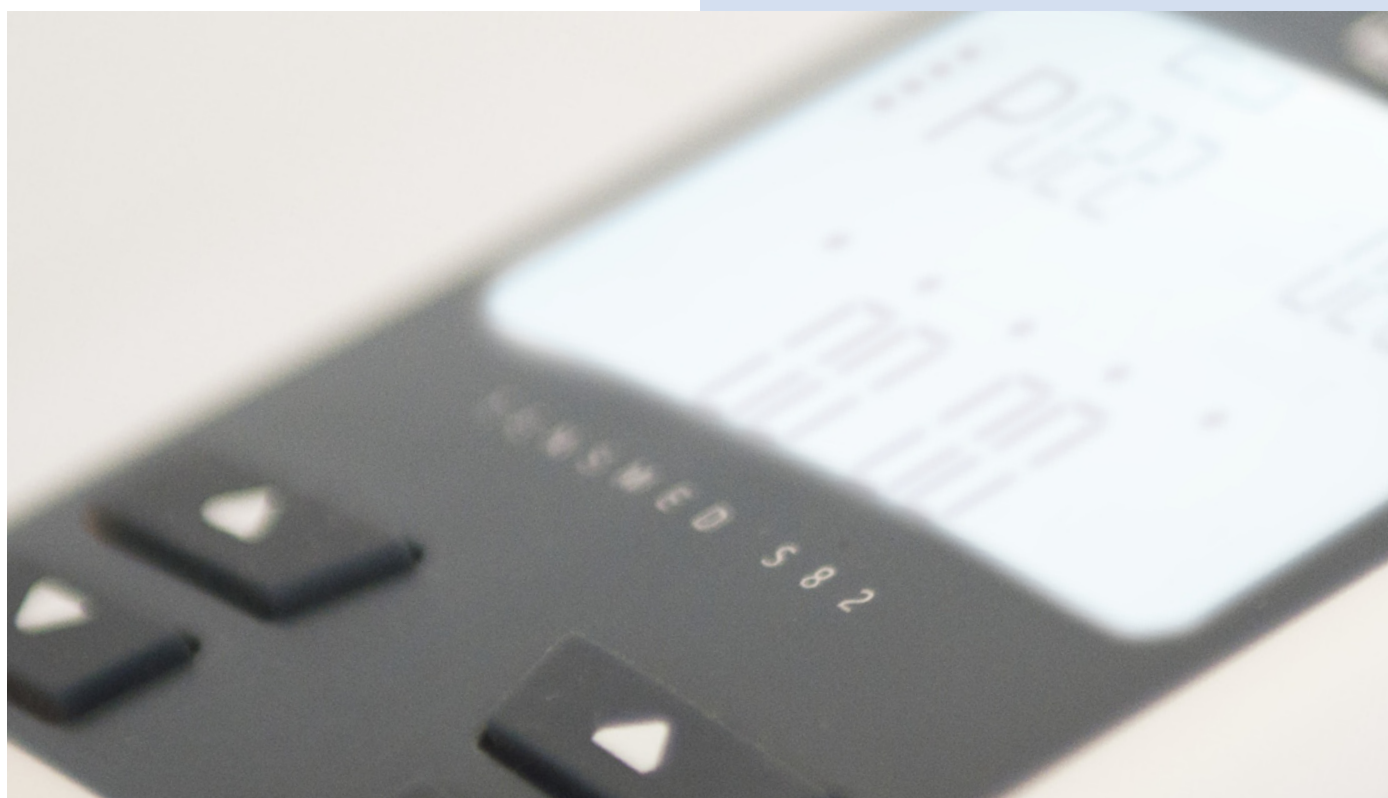

ACCESSOIRES TENSMED S82

ELECTRODES

ELECTRODES ADHÉSIVES

3444222 EN-Trode Ø 2,2 cm, 2 mm cheville, 10x8 pc. (aussi pour EMG)

3444056 EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

3444135 EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

3444057 EN-Trode 5x5 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

3444058 EN-Trode 5x9 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

ELECTRODES CAOUTCHOUC

3444128 Electrodes caoutchouc 4x6 cm, 2 mm cheville, 2 pc.

3444129 Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville, 2x2 pc.

3444130 Electrodes caoutchouc 8x12 cm, 2 mm cheville, 2 pc.



3444380 Electrodes en silicone 5x5 cm TENS

ESPONGES POUR ÉLECTRODES CAOUTCHOUC

1460273 Esponges pour électrodes caoutchouc 4x6 cm, 4 pc.

1460266 Esponges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, 4 pc.

1460275 Esponges pour électrodes caoutchouc 8x12 cm, 4 pc.

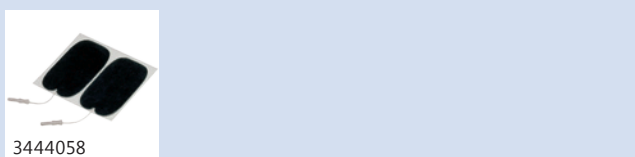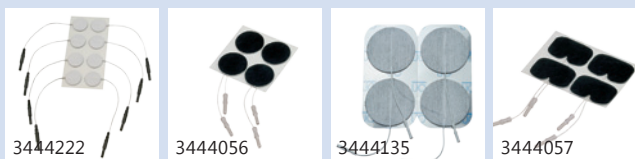

CÂBLE PATIENT

ADAPTATEURS

2523524 Adaptateur pour 4 mm fiche à 2 mm cheville, rouge

2523523 Adaptateur pour 4 mm fiche à 2 mm cheville, noir



Enraf-Nonius S.A.
 15 rue Paul Langevin
 ZAC Les Baudottes
 93274 Sevan
 T +33 01 49 36 18 18
 F +33 01 43 84 76 49
enraf-noniusfrance@enrafnoniusfrance.com

